

# Gamme préparation du médicament

## Écrase-comprimés Tookan®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une **fine poudre**. Le broyage s'effectue du bout des doigts, sans effort.

Grâce aux sachets stockables dans le Tookan®, **aucune perte ni contamination** n'est possible avec d'autres médicaments. L'hygiène est donc totalement respectée !



### Points forts

- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Broyage sans effort
- ▶ Stockage des sachets dans l'appareil

# Écrase-comprimés Tookan®

## Caractéristiques techniques

### Écrase-comprimés Tookan®

- ▶ Base en tôle acier peinte époxy
- ▶ Poignée en polyamide
- ▶ Mâchoire en aluminium anodisé
- ▶ Axes en inox
- ▶ Poids : 1,4 kg

### Sachets pour écrase-comprimés

- ▶ Polyéthylène basse densité transparent
- ▶ Épaisseur : 180/200 µm
- ▶ Respectueux de l'environnement



Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Écrase-comprimés manuel Tookan®</b>	L. 265 x P. 75 x H. 90	NA00017_V02
<b>Lot de 1000 sachets pour Tookan®</b>	L. 50 x H. 100	NA00011.01

## Utilisation



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez les médicaments dans le sachet puis repliez-le.



3 Insérez le sachet dans la mâchoire du broyeur.



4 Donnez quelques pressions sur la poignée, du bout des doigts, sans lâcher le sachet.



5 Récupérez les médicaments réduits en fine poudre.