

## Circuit du médicament et des DM | Gamme préparation du médicament

# ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une **fine poudre**. Équipé d'une poignée permettant l'écrasement des comprimés sans effort, il convient à tous.

Grâce aux sachets stockables dans le Tookan®, **aucune perte ni contamination** n'est possible avec d'autres médicaments. L'hygiène est donc totalement respectée !



Maniable



Ergonomique



Hygiénique



- Facile d'utilisation
- Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Broyage sans effort
- Stockage des sachets dans l'appareil



## GAMME PRÉPARATION DU MÉDICAMENT

# ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ÉCRASE-COMPRIMÉS TOOKAN®

- Base en tôle acier peinte époxy
- Poignée en polyamide
- Mâchoire en aluminium anodisé
- Axes en inox
- Poids : 1,4 kg

#### SACHETS POUR ÉCRASE-COMPRIMÉS

- Polyéthylène basse densité transparent
- Épaisseur : 180/200 µm
- Respectueux de l'environnement



Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Écrase-comprimés manuel Tookan®	L. 265 x P. 75 x H. 90	NA00017_V02
Lot de 1000 sachets pour Tookan®	L. 50 x H. 100	NA00011.01

### UTILISATION



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez le ou les médicaments dans le sachet, puis insérez-le dans la mâchoire du broyeur.



3 Donnez quelques pressions avec votre main, puis relâchez.



4 Vous pouvez récupérer les médicaments réduits en fine poudre.

### Équipements complémentaires

Découvrez notre broyeur de comprimés électrique Severo® ainsi que notre coupe-comprimés et écrase-comprimés de poche.