


Hygiène et quotidien

# Couverts Gyenno Twist

Pour les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ou d'autres maladies occasionnant des tremblements, le repas est une épreuve.

Les couverts Gyenno Twist, avec embout cuillère et fourchette, redonnent de l'autonomie aux personnes souffrant de tremblements. **Leur technologie permet de compenser 85 % des tremblements.** Leur utilisation intuitive et universelle permet de manger de façon indépendante et sans stress, redonnant ainsi le plaisir de manger.

Photos non contractuelles

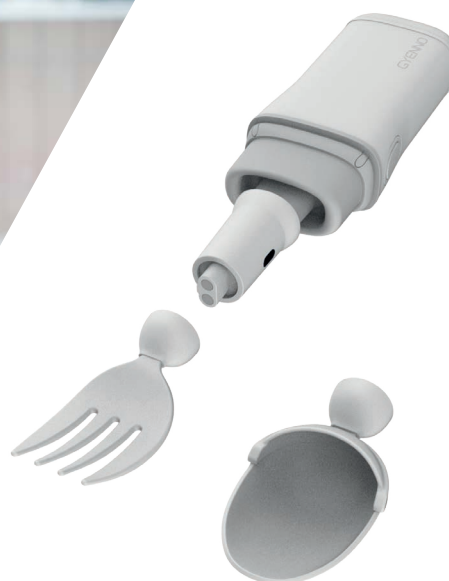

Hygène




Ergonomie

## Points forts

- ▶ Compensation des tremblements jusqu'à 7 cm
- ▶ Stabilisation à 360°
- ▶ Distinction entre les mouvements volontaires et les tremblements inconscients
- ▶ Reconnaissance automatique droitier ou gaucher
- ▶ Autonomie 3 jours (3 repas par jour)

Hygiène et quotidien

# Couverts Gyenno Twist

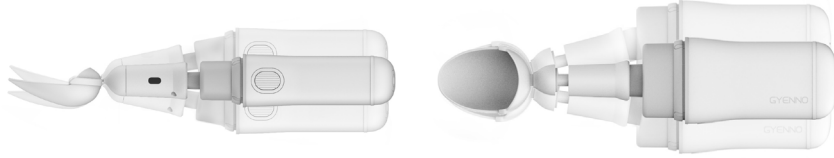


Compensation des tremblements horizontaux et verticaux



Fourchette : fonction « spaghetti »

## Composition du kit

- ▶ Une embase
- ▶ Un couvercle
- ▶ Un embout cuillère
- ▶ Un embout fourchette
- ▶ Un câble de recharge
- ▶ Un cordon de maintien

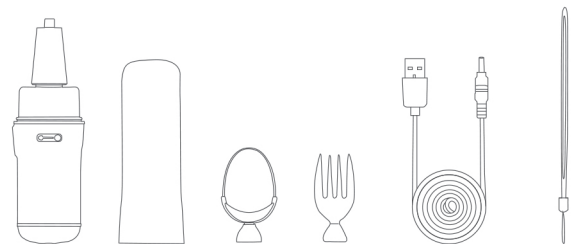

Désignation



Référence

Couverts anti-tremblements Gyenno Twist

2G000

## Informations techniques

- ▶ Autonomie : 180 mn
- ▶ Temps de charge : 2h30
- ▶ Poids : 157 g

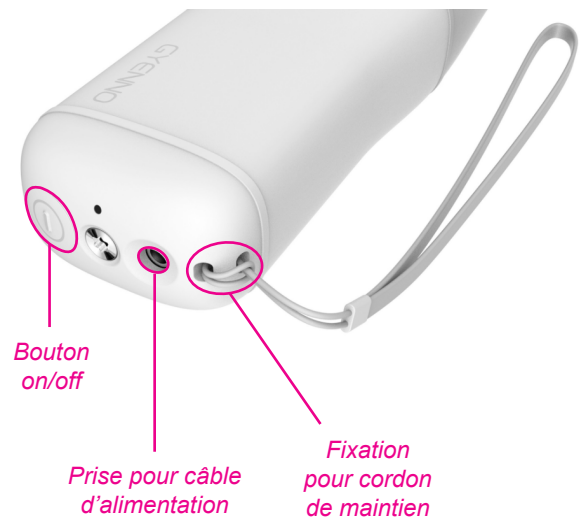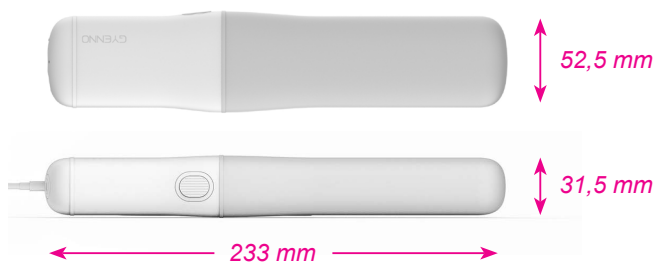

## Nettoyage

Les embouts cuillère et fourchette se lavent avec un détergent pour vaisselle et de l'eau, et peuvent être passés en lave-vaisselle. Si une désinfection légère est nécessaire, utilisez une solution alcoolique (éthanol 75 %, isopropyl 70 % par exemple).

La membrane se nettoie avec un détergent doux et de l'eau ; bien la sécher. Si une désinfection légère est nécessaire, utilisez un coton avec une solution alcoolique (éthanol 75 %, isopropyl 70 % par exemple) et séchez avec un tissu en coton.