

# Préparation du médicament

## Broyeur de comprimés Severo®

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Le broyeur électrique Severo® permet de **réduire en une fine poudre les comprimés** les plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des professionnels de santé pour **éviter les troubles musculo-squelettiques** dûs au broyage manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.



Hygèniq



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Quasi silencieux
- ▶ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ▶ Facilement nettoyable
- ▶ Léger et portable

Visionnez-moi



## Préparation du médicament

# Broyeur de comprimés Severo®

### Broyeur Severo®

#### Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie



#### Désignation

#### Référence

<b>Broyeur de comprimés Severo®</b>	NA00030.01
<b>Broyeur de comprimés électrique Severo® + stabilisateur</b>	NA00030_STAB
<b>Broyeur de comprimés électrique Severo® + stabilisateur + support pour gobelets</b>	NA00030_DIST

#### Utilisation



Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



Placez une rondelle puis la tête de broyage sur le gobelet. La rondelle est conseillée mais pas obligatoire.



Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients ou au gel à avaler.

## Préparation du médicament

# Broyeur de comprimés Severo®

### Stabilisateur Severo®

- ▶ Dimensions : L. 160 x P. 160 x H. 4 mm
- ▶ Poids : 150 g
- ▶ Base tôle en acier avec dessous recouvert d'une feutrine
- ▶ Aimant adhésif à coller sous le Severo



Désignation	Référence
<b>Stabilisateur Severo®</b>	NA00040

### Support pour gobelets

- ▶ Capacité : 35 gobelets
- ▶ Matière : Fil acier époxy polyester blanc
- ▶ Mode de fixation : par aimant sur la plaque stabilisatrice
- ▶ Dimensions : L. 54 x P. 46 x H 155,5 mm



Désignation	Référence
<b>Support pour gobelets</b>	NA00021

### Consommables

Désignation	Référence
<b>2100 gobelets à usage unique</b>	NA00014.01
<b>2000 couvercles à usage unique</b>	GV60281
<b>2100 rondelles à usage unique</b>	NA00016



### Eau gélifiée Severo®

L'eau gélifiée Severo® est conçue pour faciliter l'administration des médicaments. Elle est idéale pour les personnes présentant des troubles de la déglutition.

Désignation	Conditionnement	Référence
<b>4 bouteilles d'eau gélifiée saveur tutti frutti</b> avec pompe doseuse	4 x 1 litre	NA00047
<b>1 échantillon d'eau gélifiée saveur tutti frutti</b>	8 mL	NA00043
<b>4 bouteilles d'eau gélifiée saveur banane</b> avec pompe doseuse	4 x 1 litre	NA00048
<b>1 échantillon d'eau gélifiée saveur banane</b>	8 mL	NA00046

