

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Le broyeur électrique Severo® permet de **réduire en une fine poudre les comprimés** les plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des professionnels de santé pour **éviter les troubles musculo-squelettiques** dûs au broyage manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.



Hygienne



Ergonomie

Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Quasi silencieux
- ▶ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ▶ Facilement nettoyable
- ▶ Léger et portable



Visionnez-moi

Broyeur Severo®

Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie



Désignation

Référence

Broyeur de comprimés Severo®	NA00030.01
Broyeur de comprimés électrique Severo® + stabilisateur	NA00030_STAB
Broyeur de comprimés électrique Severo® + stabilisateur + support pour gobelets	NA00030_DIST

Utilisation



Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



Placez le gobelet sur le plateau.



Insérez le ou les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



Positionnez une rondelle sur le gobelet.



Placez la tête de broyage sur la rondelle.



Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés au repas du patient ou au gel à avaler.

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Stabilisateur Severo®


- Dimensions : L. 160 x P. 160 x H. 4 mm
- Poids : 150 g
- Base tôle en acier avec dessous recouvert d'une feutrine
- Aimant adhésif à coller sous le Severo

Désignation

Référence

Stabilisateur Severo®

NA00040

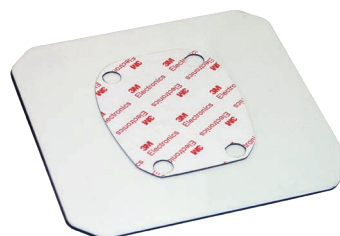

Support pour gobelets

- Capacité : 35 gobelets
- Matière : Fil acier époxy polyester blanc
- Mode de fixation : par aimant sur la plaque stabilisatrice
- Dimensions : L. 54 x P. 46 x H 155,5 mm

Désignation

Référence

Support pour gobelets

NA00021



Consommables

Désignation

Référence

2100 gobelets à usage unique

NA00014.01

2000 couvercles à usage unique

GV60281

2100 rondelles à usage unique

NA00016



Eau gélifiée Severo®

L'eau gélifiée Severo® est conçue pour faciliter l'administration des médicaments. Elle est idéale pour les personnes présentant des troubles de la déglutition.

Désignation

Conditionnement

Référence

4 bouteilles d'eau gélifiée saveur tutti frutti avec pompe doseuse

4 x 1 litre

NA00047

1 échantillon d'eau gélifiée saveur tutti frutti

8 mL

NA00043

4 bouteilles d'eau gélifiée saveur banane avec pompe doseuse

4 x 1 litre

NA00048

1 échantillon d'eau gélifiée saveur banane

8 mL

NA00046

